

FILMED

LABORATOIRES



AKTIVIERUNG DES VOLLEN
POTENTIALS DER HAUT
mit NCTF[®] 135 HA

GESUNDE FIBROBLASTEN: ESSENZIELL FÜR DIE KOLLAGENSYNTHESE



Junge Haut

FIBROBLASTEN, PRIMÄRZELLEN DER DERMIS

- Produktion von Kollagen, Elastin, Hyaluronsäure, etc.
- Schlüsselrolle zur Erhaltung eines jugendlichen Hautbilds



ALTERUNG & OXYDATIVER STRESS


Abnahme der Fibroblastenaktivität



Verminderung der Qualität und Quantität von Elastin, Kollagen, Hyaluronsäure, usw.



Erste sichtbare Alterserscheinungen

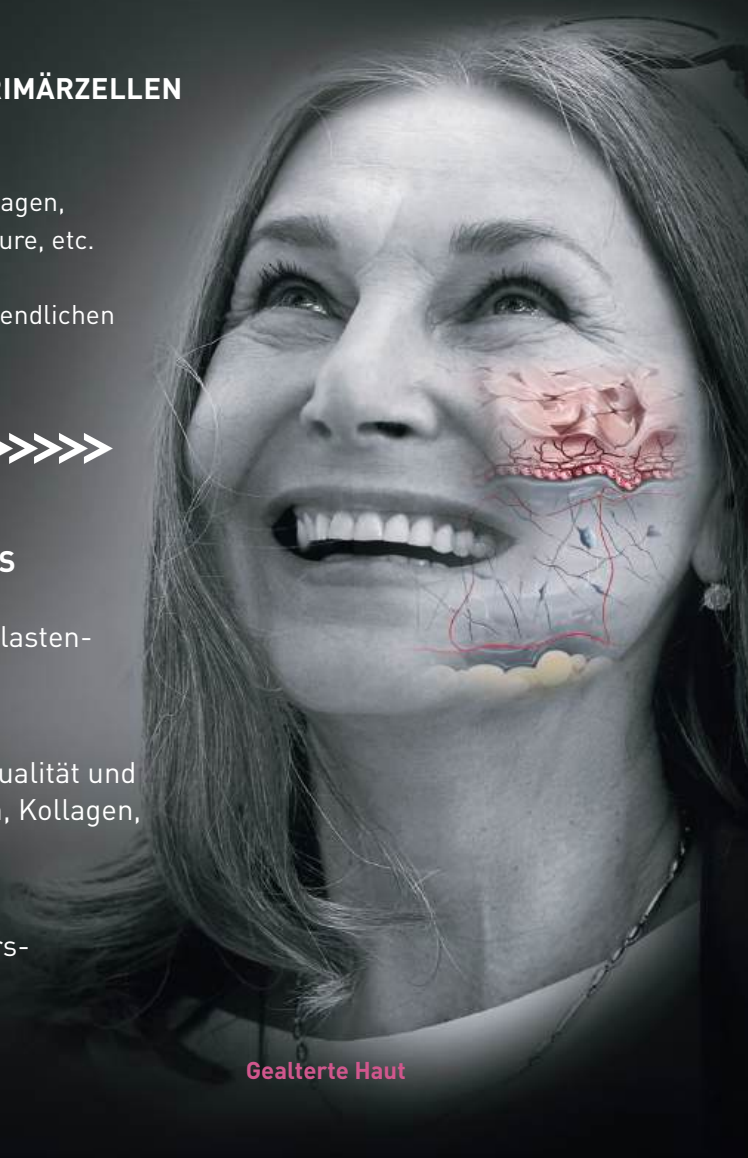

Gealterte Haut

KOLLAGEN - SCHLÜSSELROLLE IM ALTERUNGSPROZESS DER HAUT


- macht **70 % bis 80 %** der Hauttextur aus
- Wesentlich für die **Struktur, Elastizität & Festigkeit der Haut**
- ab dem 25. J. nimmt die Kollagenproduktion jährlich um **-1 % bis -1,5 %** ab

NATÜRLICHE INDUKTION DER NEOKOLLAGENESE

Ein optimales Zellmilieu mit essenziellen Inhaltsstoffen stimuliert die Produktion von neuem Kollagen:

- Aktivierung der Fibroblasten
- Stabilisierung von Kollagen
- Kollagenmetabolismus:

Aminosäuresequenz

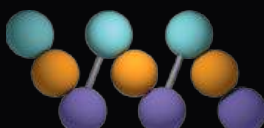

Prokollagen



Kollagenfibrille und -faser



EINE EINZIGARTIGE & VOLLSTÄNDIGE FORMULIERUNG


**SELEKTION ESSENZIELLER
WIRKSTOFFE**
auf der Grundlage der Zellbiologie

**PRÄZISE KONZENTRATION
JEDES INHALTSSTOFFS**

12 VITAMINE



FREIE HYALURONSÄURE
(5 MG/ML)

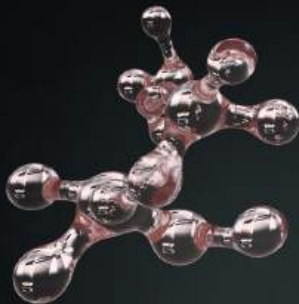

**GLUTATHION & 5 WEITERE
ANTI-OXIDANTIEN**



24 AMINOSÄUREN



6 CO-ENZYME



6 MINERALIEN



**60
WESENTLICHE
BESTANDTEILE**

5 NUKLEOSIDE



EIN OPTIMALES ZELLMILIEU FÜR DAS FUNKTIONALE GLEICHGEWICHT DER HAUT⁽¹⁾

Zur physiologischen Aktivierung von Fibroblasten und die Anregung der
Kollagenproduktion

MIT HOHER BIOKOMPATIBILITÄT & SICHERHEIT⁽²⁾

Aufrechterhaltung der Zellproliferation durch In-vitro-Evaluierung nachgewiesen - ideal für alle Hautzustände

[1] Polyc component mesotherapy formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality, Sergey Prikhnenko, Clinical, Cosmetic, Investigational Dermatology 2015;8 151-157. Ergebnisse, die mit NCTF®-Pulver erzielt wurden. [2] Jäger, C., Brenner, C., Habicht, J. und Wallich, R. (2012) Bioactive Reagents Used in Mesotherapy for Skin Rejuvenation in Vivo Induce Diverse Physiological Processes in Human Skin Fibroblasts in Vitro-A Pilot Study. Experimental Dermatology, 21, 72-75. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0625.2011.01400.x>

1/ SOFORTIGER GLOW

+119% LEUCHTKRAFT NACH 3 SITZUNGEN⁽³⁾



2/ KONTINUIERLICHE FESTIGUNG DER DERMIS

Tonizität | Dermisdichte | Straffungseffekt

IN VITRO EVALUIERUNG

+256% DER KOLLAGENSTIMULATION⁽¹⁾

+148% DER FIBROBLASTENSTIMULATION⁽¹⁾

IN VIVO EVALUIERUNG

+54% DER DERMISDICHTE⁽⁴⁾


+69% DER HAUTSPANNKRAFT⁽⁵⁾

3/ FALTENGLÄTTUNG


-50% DER WANGENFALTEN⁽³⁾

-40% DER KRÄHENFÜSSE⁽³⁾

-32% DER HALSLINIEN⁽³⁾

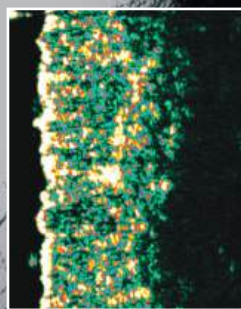


VORHER⁽⁴⁾

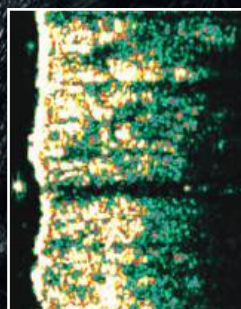

NACHHER – T120⁽⁴⁾

ALTES KOLLAGEN: GRÜN
NEUES KOLLAGEN: GELB

REDUZIERUNG VON KRÄHENFÜSSEN⁽⁴⁾

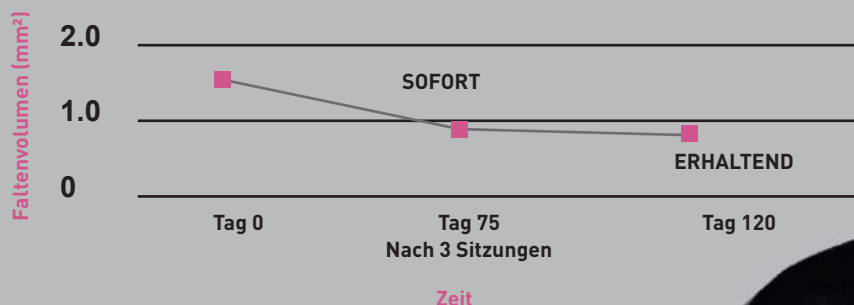

PROTOKOLL IN 3 SITZUNGEN

1-2
Vials
für das gesamte
Gesicht



3 WOCHEN



3 WOCHEN



- 3 Sitzungen im Abstand von 3 Wochen
- 2x Protokolle pro Jahr für optimierte und kumulative Ergebnisse
- Zusätzliche Sitzungen nach Bedarf, zur Aufrechterhaltung / Steigerung der Ergebnisse
- Gesicht, Hals, Dekolleté.

Jüngere Patienten: 1 Vial für das gesamte Gesicht
Ältere Patienten: 2 Vials für das gesamte Gesicht
1 Vial extra für Hals & Dekolleté

INJEKTIONSTIEFE: INTRADERMAL

RETROGRADES INJIZIEREN

Entlang der Falten
mit einer Nadel oder Kanüle

MULTI-INTRADERMALE INJEKTION
Papeln alle 1-1,5 cm mit Nadel oder
NANOSOFT®

PUNKT-zu-PUNKT TECHNIK
Entlang der Falten mit einer Nadel oder
NANOSOFT®

INJEKTIONS-VIDEO E-ACADEMY

Folge:
Injektionstechnik
NCTF® 135 HA



**HIER
SCANNEN**

(1) Polycosmetology formulations for the treatment of skin aging and improvement of skin quality, Sergey Prikhnenko, Clinical, Cosmetic, Investigational Dermatology 2015:8 151-157. Ergebnisse mit NCTF®-Pulver. (3) Vergleichende klinische Split-Studie für Gesicht und Hals mit NANOSOFT® versus klassischer Nadel für Anti-Aging-Effekte von NCTF® 135 HA an 40 gesunden Probanden, 2019. Randomisierte kontrollierte Studie, monozentrische und prospektive Studie. 3 Sitzungen im Abstand von 21 Tagen im Gesicht und am Hals. Klinisches Scoring + instrumentelle Messungen (HEBE 3 Studie). (4) Klinische Studie mit 3 Sitzungen von NCTF® 135 HA an gesunden Probanden, 2019. Randomisierte kontrollierte Studie, multizentrisch (10 Zentren) und prospektiv. 147 Probanden eingeschlossen. 3 Sitzungen im Abstand von 21 Tagen auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Klinisches Scoring + instrumentelle Messungen (HEBE2-Studie). (5) Ergebnisse nach 3 Behandlungen - Klinische Bewertung der Wirksamkeit von 5 Behandlungen mit NCTF® 135 HA bei gesunden Freiwilligen, 2011. Offene, multizentrische (16 Zentren) und prospektive Studie. 40 Probanden eingeschlossen. 3 Sitzungen im Abstand von 15 Tagen und 2 Sitzungen im Abstand von 30 Tagen. Klinisches Scoring.

READY-TO-USE BOX

ERWEITERN SIE DAS POTENTIAL IHRER PRAXIS MIT NCTF® 135 HA



5 x 3 ml Vials

5 x 3 ml Einweg-Spritzen

5 x 18G Aufzieh-Nadeln


5 x 30G 18mm & 32G 4mm Nadeln

ZUR STEIGERUNG IHRER BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN



NEUE PATIENTEN GEWINNEN UND IHRE LOYALITÄT STEIGERN

- 98 % der Patienten empfehlen das NCTF® 135 HA Protokoll ⁽⁴⁾
- Ideal für Patienten, die ein natürliches Ergebnis wünschen / Fillern abgeneigt sind

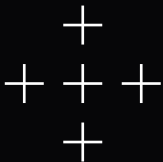

OPTIMIEREN SIE ÄSTHETISCHE VERFAHREN, DIE SIE BEREITS ANBIETEN

NCTF® 135 HA ist ein Hautprimer zur Vorbereitung der Haut durch eine optimale Wirkstoffversorgung und zur Verbesserung der Haut-Regeneration, kombinierbar mit ART FILLER®, Laser, Peelings, Botulinumtoxin, etc. ⁽⁶⁾

NACHGEWIESENE ERGEBNISSE DER KOMBINATION VON NCTF® 135 HA + ART FILLER® ⁽⁷⁾

- Kombination aus Stimulation & leichtem Volumen
- Sichtbare Ergebnisse nach nur 1 Sitzung
- Bestätigt durch klinische Studie & Publikation

ZUR STUDIE



„PUBLI-VIDEO“



⁽⁴⁾ Klinische Studie mit 3 Sitzungen von NCTF® 135 HA an gesunden Freiwilligen, 2019. Randomisierte kontrollierte Studie, multizentrische (10 Zentren) und prospektive Studie. 147 Probanden eingeschlossen. 3 Sitzungen im Abstand von 21 Tagen auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Klinisches Scoring + instrumentelle Messungen [HEBE2-Studie]. ⁽⁶⁾ Nicht in der gleichen Sitzung. ⁽⁷⁾ Fanian F, Philippon V, Gorj M, Rummyantseva Mathey E, Caillens M, Goerchurn R, Curic S, Humbert P. evaluation of the performance and tolerance of the combination of an HA- based filler with TRI-HYAL® Technology and a skin biorevitalizer on skin aging parameters. Clin cosmet invest dermatol. 2023;16:1095-1105.

VORHER & NACHHER
SICHTBARE + NACHGEWIESENE ERGEBNISSE



VORHER
Tag 0



NACHHER
3 Sitzungen - Tag 49



NACHHER
3 Sitzungen - Tag 120



VORHER
Tag 0



NACHHER
3 Sitzungen - Tag 49



NACHHER
3 Sitzungen - Tag 120



VORHER



NACHHER
nach 3 Sitzungen

HAUTAKTIVIERUNG MIT NCTF® 135 HA



AMWC AWARDS

BESTE INJIZIERBARE LÖSUNG
ZUR HAUTREVITALISIERUNG
2023

EINZIGARTIGE & GANZHEITLICHE REZEPTUR

Regenerierende Injektionslösung mit 60 für die Funktionen der Haut wesentlichen Inhaltsstoffen

KONTINUIERLICHE HAUTAKTIVIERUNG

Sofortiger Glow | Kollagenstimulation

SKIN PRIMER

Zur Unterstützung jeder anderen ästhetischen Behandlung^(8, 9)

3-SITZUNGS-PROTOKOLL

Standardisiertes Protokoll für hohe Effizienz

FUNDIERTE ERGEBNISSE

Mehr als 15 Jahre wissenschaftliche Daten und Veröffentlichungen

& AUSGEZEICHNET



BEST PRODUCT
2018



DIAMOND AWARD
SKIN HERO PRODUCT
2021



B E A U T Y I S A N A R T , W E M A D E I T A S C I E N C E

NOVVIA GmbH | Am Lohmühlbach 17 | D-85356 Freising | Tel: +49 (0) 8161 96 99 40
Mail: info@novvia. | www.novvia.de

[8] Fanian F, Philippon V, Gorj M, Romyantseva Mathey E, Caillens M, Goorochurn R, Curic S, Humbert P. evaluation of the performance and tolerance of the combination eines HA-basierten Fillers mit TRI-HYAL®-Technologie und eines Haut-Biorevitalisators auf Hautalterungsparameter. Clin cosmet investig dermatol. 2023;16:1095-1105. [9] Pisal P. [2023] Die kombinierte Wirkung von Botulinumtoxin Typ A mit einer Biorevitalisierungsbehandlung auf die Verjüngung der Stirn: eine Fallserie. Journal of cosmetics, dermatological sciences and applications, 13, 124-135. doi: 10.4236/jcdsa.2023.132012. NCTF® 135 HA und ART FILLER® sind injizierbare Medizinprodukte, hergestellt von FILLMED LABORATORIES, die nur von autorisierten Anwendern verwendet werden dürfen. NANOSOFT® ist ein Medizinprodukt, das für die intradermale Injektion mit Mikronadeln bestimmt ist. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Vigilance-Kontakt (Meldung eines unerwünschten Ereignisses): vigilance@fillmed.com.